




TUBUS one

Rengøringsvejledning

Husk også

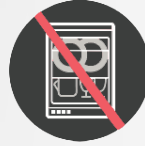

Benyt ikke opvaskemaskine eller klorholdige rengøringsprodukter



Rengør TubusOne hver dag




TubusOne tip skal skiftes hver 4-6 uge og sættes på korrekt – helt i bund over den tynde stang



TubusOne mundstykke skal skiftes hver dag for optimal hygiejne

Aluminiumsrør 1
Stempel 2
Tip 3
Rengøringspind 4
Mundstykke 5
TubusClip 6

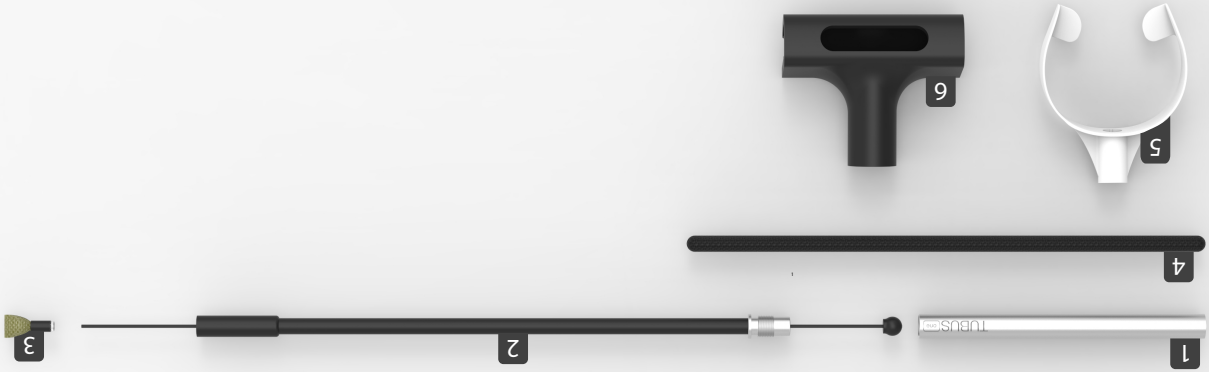

► [Se vores video guide på tubusone.com/get-started](https://www.tubusone.com/get-started)

Rengøring af TubusOne

Afmontering og rengøring

- Drej aluminiumsrør (1) fra stempel (2), mod urets retning

- Indfør rengøringspind (4) i aluminiumsrør (1) og ryk frem og tilbage.
Vask evt. aluminiumsrør (1) i vand og sæbe.
Husk at skylle efter i rent vand

- Tag tip (3) af og hiv den tynde sorte pind ud af stempelt (2). Du har nu 3 løse dele inklusiv en tip (3). Husk at skylle stempelt (2) i vand

- Vask kuglen af i vand og sæbe. Husk at skylle efter i rent vand – der kan med fordel renses efter med sprit

Montering

- Tjek at TubusOne er tør inden montering

- Sæt den tynde pind ind i stempelt (2) fra enden med gevind

- Tippen (3) skal sættes på den tynde pind Husk at tørre tippen (3) helt i bund. Fres efter for at sikre at den sidder korrekt

- Skru aluminiumsrør (1) på stempelt (2)

- Sæt mundstykket (5) på aluminiumsrør (1) og husk at begge huller skal vende nedad

Tjek inden brug

- Tjek at den sorte kugle ikke kan ses i bunden ved mundstykket, når produktet holdes lodret i luften. Kan kuglen ses, skal tippen sættes yderligere ned over den tynde sorte pind

- Tjek at mundstykke sidder helt i bund over aluminiumsrør (1) med begge huller nedad

- Tjek at tippen sidder helt i bund over den tynde sorte pind

- Hvis TubusOne ikke virker, forsøg da at skifte tippen og/eller mundstykket eller rengør produktet og forsøg igen