

Für eine optimale Hygiene des TubusOne sollte jeden Tag ein neues Mundstück auf das Aluminiumrohr geschoben werden



Die Spitze von TubusOne sollte alle 4-6 Wochen ersetzt werden. Zur korrekten Montage muß die Spitze so weit wie es geht auf den dünnen Carbonstab geschoben werden

TubusOne täglich reinigen



Keine Geschirrspülmaschine oder irgendwelche chlorbasierten Reinigungsmittel benutzen


Bitte Beachten

# TUBUS one

## Reinigungsanleitung

Bitte  
aufbewahren!  
**Reinigungs  
anleitung**

- 1 Aluminiumrohr
- 2 Stempel
- 3 Spitze
- 4 Reinigungsstab
- 5 Mundstück
- 6 TubusClip

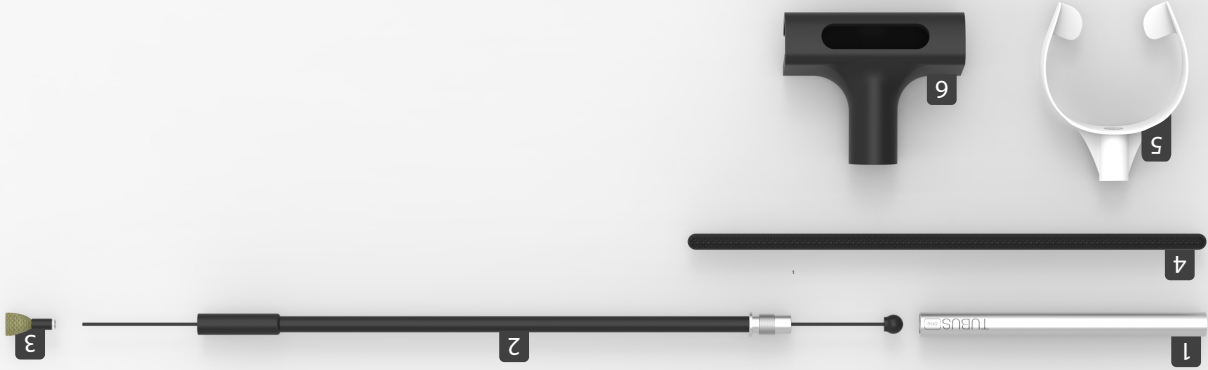

► Schauen Sie dazu die [Videoanleitung auf tubusone.com/get-started](https://www.tubusone.com/get-started)

## Reinigen des TubusOne

### Montage der Einzelteile

### Demontage und Reinigung

- Trennen Sie das Aluminiumrohr (1) vom Stempel (2) durch drehen gegen den Uhrzeigersinn

- Schieben Sie den Reinigungsstab (4) in das Aluminiumrohr (1) und bewegen es hin und her. Waschen sie das Aluminiumrohr (1) mit Wasser und Seife. Wichtig: mit klarem Wasser innen und außen abspülen

- Ziehen Sie zuerst (3) von dem dünnen Carbonstab ab und entnehmen den Carbonstab aus der Stempelrinne. Sie haben jetzt 3 einzelne Teile incl. Spitze (3). Wichtig: mit klarem Wasser abspülen. Eventuell kann man Alkohol zum Desinfizieren verwenden

- Wasche die kleine Kugel am Ende des Carbonstab mit Wasser und Seife. Bitte mit klarem Wasser nachspülen. Man kann Alkohol zum reinigen benutzen

Aluminiumrohr – nach unten zeigen müssen

- Überprüfe Sie vor der Montage, ob die Einzelteile des TubusOne trocken sind
- Die Spitze (3) wird auf auf den dünnen Carbonstab geschoben. Wichtig: Sorgen Sie dafür, daß die Spitze ganz bis zum Ende aufzuschieben. Drücken auf die Spitze, um sicherzugehen, daß Sie richtig montiert ist
- Schieben Sie den dünnen Carbonstab von der Seite mit dem Gewinde in das Aluminiumrohr (2) hinein
- Schieben Sie das Mundstück (5) auf das Aluminiumrohr (1) und beachten Sie, daß beide seitlichen Öffnungen – das Loch im Mundstück und der Schlitz im Aluminiumrohr – nach unten zeigen müssen

- Schraube Sie nun das Aluminiumrohr (1) auf den Stempel (2)

vorgang

- Stellen Sie sicher, daß die kleine Kugel nicht bis in die Öffnung im Mundstück ragt, wenn TubusOne senkrecht mit dem Mundstück nach unten gehalten wird. Wenn die kleine Kugel dann sichtbar ist, muss die Spitze weiter auf das dünnen Carbon-Stäbchen geschoben werden
- Überprüfen Sie, ob das Mundstück in der richtigen Position auf dem Aluminiumrohr sitzt: Beide seitliche Öffnungen müssen nach unten weisen, wenn TubusOne waagrecht gehalten wird
- Prüfen Sie, ob die Spitze fest auf den dünnen Carbonstab aufgeschoben ist. Dazu den dünne Carbonstab festhalten und gegen die Spitze drücken
- Wenn TubusOne nicht funktioniert, versuche Sie, die Spitze und/oder das Mundstück neu zu montieren, oder Sie wiederholen den ganze Reinigungs-

### Überprüfung vor der Benutzung