



TUBUS one

Puhdistusopas

Muista



Puhdista TubusOne päivittäin



Älä käytä astiapesukonetta tai
Klooripohjaisia puhdistusaineita



TubusOne-kärki on vaihdettava 4-6 viikon
vällein ja asennettava oikein – kokonaan
alas ohuen sauvan päälle



TubusOne-suukappale tulisi vaihtaa päivit-
tään optimaalisen hygienian
varmistamiseksi!

Alumiiniputki 1
Mäntä 2
Kärki 3
Puhdistustanko 4
Suukappale 5
Tubus Pidike 6



► [Katso video-opas osoitteessa tubusone.com/get-started](https://www.tubusone.com/get-started)

Cleaning TubusOne

Purkaminen ja puhdistaminen

- Poista alumiiniputki (1) männästä (2)
- Aseta puhdistustanko (4) alumiiniputkeen (1) ja liikuta sitä edestakaisin. Pese alumiiniputki (1) vedellä ja saippualla. Muista huuhdella puhtaalla vedellä.
- Poista kärki (3) ja musta tikku männästä (2). Sinulla on nyt kolme erillistä osaa kärki (2) mukaanlukien (3). Muista huuhdella mäntä (2) vedellä.

- Pese pyöreä osa vedellä ja saippualla. Muista huuhdella puhtaalla vedellä- käytä tarvittaessa alkoholia.

Osien kokoaminen

- Tarkista, että TubusOne on kuiva ennen kokoamista

- Laita ohut sauva mäntään (2) hopeisesta päästä

- Kärki (3) kiinnitetään ohueen sauvaan. Muista sijoittaa kärki pohjaan asti. Paina varmistaakseen, että sauva on sijoitettu oikein.

- Kierrä alumiiniputki (1) mäntään (2)

- Kiinnitä suukappale (5) alumiiniputkeen (1). Molempien reikien on oltava alaspäin

uudelleen

- Jos TubusOne ei toimi, kokeile kiinnittää kärki ja/tai suukappale uudelleen tai puhdista tuote

- Tarkista, että kärki on kiinnitetty oikein ohuelle saualle

- Tarkista, että suukappale on asennettu oikein alumiiniputkeen. Molempien reikien on oltava alaspäin

- Tarkista, että ohuen sauvan pyöreä pää ei ole paina kärki syvemmälle paksum sauvaan. näkyvissä suukappaleessa, kun pidät putkea vaakatasossa. Jos pyöreä pää on näkyvissä, paksum kärki syvemmälle paksum sauvaan.

Tarkista ennen käyttöä